

NANO
rouška

SPURTex[®] VS

SPUR[®]

Ochranná 3vrstvá rouška z nanomateriálu s gumičkami/šňůrkami

Ochranná 3vrstvá rouška s vysoce účinným filtračním nanomateriálem

Maximální ochrana proti šíření virové i bakteriální infekce pro nositele i jeho okolí

Nosná vrstva viskóza, vnitřní nanomateriál PVDF

Filtrační účinnost membrány 84 %
pro částice velikosti viru

Nízký tlakový odpor 40 – 60 Pa
při průtoku vzduchu 30 l/min

Užitné vlastnosti jsou srovnatelné
s respirátorem bez ventilu


Uchycení na gumičky/šňůrky

Vyztužený ohybatelný okraj



ilustrativní foto

CE

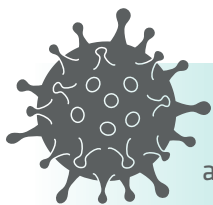

Ochrana
před viry
a bakteriemi



3vrstvá
konstrukce
roušky



SPUR a.s. – výrobce
nanotextilie **SPURTex[®] VS**

Nasazení roušky s gumičkami/šňůrkami (v souladu s doporučením WHO)

1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem, utřete si ruce jednorázovým ručníkem a použijte dezinfekci.
2. Vyjměte roušku a zkontrolujte neporušenost jak balení, tak samotné roušky.
3. Uchopte roušku tak, aby ohybatelný okraj byl nahoře.
4. Při zavazování na šňůrky – přidržte si roušku na kořenu nosu a zavažte horní šňůrky na temeni hlavy na mašličku. Poté uchopte spodní šňůrky a zavažte je na zátylku. Vytvarujte okraj roušky podle tvaru svého nosu.
5. Při upevnění na gumičky – uchopte gumičky do obou rukou a napněte za uši. Vytáhněte roušku co nejvýš na kořen nosu a přetáhněte do požadovaného tvaru.
6. Uchopte spodní okraj roušky a přetáhněte přes ústa a bradu.

Sejmutí roušky s gumičkami/šňůrkami (v souladu s doporučením WHO)

1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem, utřete si ruce jednorázovým ručníkem a použijte dezinfekci. Přední strany roušky se nedotýkejte.
2. Při zavazování na šňůrky – rozvažte mašličky na zátylku, poté na temeni hlavy a roušku v držení pouze za šňůrky sejměte.
3. Při zavazování na gumičky – uchopte gumičky do obou rukou a roušku v držení pouze za gumičky sejměte.
4. Ihned uložte použitou roušku do speciálně vyhrazeného odpadu. Umyjte si ruce vodou a mýdlem, utřete si ruce jednorázovým ručníkem a použijte dezinfekci.

Pokyny pro použití

Jde o jednorázový, nesterilní výrobek. V případě opakovaného použití možnost snížení filtrační účinnosti a kontaminace.

Datum vydání: 19. května 2020

Výrobce: SPUR a.s. | třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 112 | e-mail: spurtex@spur.cz | www.spur.cz

SPUR[®]